

重庆市临床检验中心 2018 年重庆市凝血试验室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排：

2018 年重庆市凝血试验室间质评活动全年共进行 2 次，每次 5 个批号；**本次将寄发全年质评样本**，具体安排如下：

活动 次数	质评物批号	建议测定 日 期	结果回报 截止日期	临检中心 回报时间
第一次	201811, 201812, 201813, 201814, 201815	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	201821, 201822, 201823, 201824, 201825	9 月 20 日	9 月 30 日	10 月 30 日

二、质评物使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。如不能及时测定，请将质评物置于 2~8℃ 冰箱中保存。
2. 测定前将质评物从冰箱中取出，平衡至室温后用 1.0ml 蒸馏水或去离子水复溶。待质评血浆溶解后，在室温放置 15 分钟，轻轻颠倒混匀 5~10 次，切勿振摇。
3. 将质评血浆当作病人标本用您室所用试剂和方法进行测定，结果填入回报表中。同时将您室所用 PT 试剂的 ISI 值填入回报表中。
4. **请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。**

三、结果回报：

1. 各实验室应该使用标有国际敏感度指标（ISI 值）的凝血活酶试剂，根据 PT 测定的比值和 ISI 值计算出国际标准化比值（INR），将 INR 结果填入回报表中相应的位置。
2. 测定方法、试剂、测定原理和仪器名称分别按各自编码填写，若您室所采用者不在列出的范围内，则请写出具体名称，否则无法分组进行统计。
3. **校验和是此项目的 5 个批号测定结果之和，请务必填写：**请各实验室将回报表中各项内容完整逐项地填写，请记住并填写您实验室的编号（新参加单位由临检中心办公室指定实验室编码）。
4. **免费使用 Web 方式传递室间质评信息。**进入“重庆市临床检验中心 http://www.cghhospital.org/depart_check/”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、请按照本通知的时间进行第二次室间质评测定；并按时网上回报(寄回)质评结果回报表。

五、室间质评活动中的专业问题请与临检中心万雅芳联系，电话 63504402。质评办公室电话：63519127。

六、**请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：**

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014