

重庆市临床检验中心

2018 年临床实验室核酸检测（病毒学 HBV-DNA）室间质评活动安排

一. 室间质评活动安排:

2018 年重庆市临床实验室核酸检测（病毒学 HBV-DNA）室间质评项目为 HBV DNA 一项，全年室间质量评价活动共进行 2 次，每次 5 个批号，**质控样本分 2 次寄发**。具体安排如下：

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	201811、201812、201813、201814、201815	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	201821、201822、201823、201824、201825	9 月 20 日	9 月 30 日	10 月 30 日

二. 质控血清的使用及注意事项:

1. 收到质控血清后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，血清是否渗漏；如发现问题请及时与市临检中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。**质控品请放-20℃保存。**
2. 请注意**建议测定日期**和**回报结果截止日期**，在**规定时间后回报的结果不予统计**。
3. 测定前请先将质控血清恢复到室温，然后振荡使之充分混匀，取样前应瞬时离心。
4. 所发质控样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待。
5. 该质控血清按病人血清样本对待进行检测。

三. 结果回报:

1. 请正确填写回报表中的各项内容，务必填写实验室名称和实验室编号（新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码）；质评结果按批号填写，位置勿填错，填写数据时请“对号入座”，字迹清晰工整。附网上结果回报样例：

测定结果	$<5.00 \times 10^2$	2.34×10^5	1.23×10^7
网上回报结果	0	2.34E5	1.23E7

2. 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码，如果编码表上未列出你室所采用的内容，请直接填上具体的内容，如果未填写则作为不合格报表。
 3. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。进入“重庆市临床检验中心 http://www.cghhospital.org/depart_check/”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
- 四. 室间质评活动中的专业问题请与免疫室联系，电话：63516483，联系人：田华。质评办公室电话：63519127。

五. 请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区內
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2018 年 3 月