

## 重庆市临床检验中心

## 2022 年重庆市干化学室间质量评价活动安排

## 一、室间质评活动安排和项目：

2022 年干化学室间质量评价活动全年共进行三次，每次 5 个批号，本次将全年 15 个批号质评样本一并寄发，具体安排如下：

活动次数	质评物批号	建议测定日期	结果回报截止日期	统计回报结果时间
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	7 月 20 日	7 月 30 日	8 月 30 日
第三次	202231、202232、202233、202234、202235	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

质评项目（26 项）：钾、钠、氯、钙(血清总钙，未检测血清总钙的可不报)、磷、血糖、尿素、尿酸、肌酐、总蛋白、白蛋白、胆固醇、甘油三酯、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、高密度脂蛋白胆固醇、总胆红素、碱性磷酸酶、淀粉酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、 $\gamma$ -谷氨酰基转移酶、 $\alpha$ -羟丁酸脱氢酶、结合胆红素、镁、铁、脂肪酶，要求实验室开展了以上项目的都要参加室间质评。

## 二、质评物使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄；未复溶的质控血清保存在 2~8℃ 冰箱中。
2. 测定前将质评物从冰箱中取出，平衡至室温后用 3.0ml 蒸馏水或去离子水复溶，室温放置 30 分钟，轻微混匀至完全溶解后同病人标本相同条件下测定。
3. 针对强生干化学用户要求：若某些项目曾进行过仪器内的“用户校正”，请务必恢复至“非校正”状态后检测室间质评标本。

## 三、结果回报：

1. 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。
2. 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准，请正确填写回报表中的各项内容。
3. 测定方法、仪器厂家、型号、试剂和校准物厂家分别按表 1、表 2 和表 3 的编码填写（编码填错，将影响成绩）；“校验和”为 5 个批号同一项目结果之和。
4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、请按照本通知的时间进行第二次和第三次室间质评测定，并按时网上回报(寄回)质评结果回报表。

五、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话 63510942。 质评办公室电话：63519127

六、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号      重庆市人民医院三院院区  
重庆市临床检验中心质评室      邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月