

重庆市临床检验中心 2022 年内分泌测定室间质量评价活动安排及注意事项

一、室间质评活动安排：

2022 年重庆市内分泌室间质量评价将进行 2 次活动, 每次 5 个批号, 测定项目有总 T3(T3)、游离 T3(FT3)、总 T4(T4)、游离 T4(FT4)、促甲状腺素(TSH)、促卵泡成熟激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、孕酮(P)、催乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB₁₂)、25-羟基维生素 D、皮质醇、醛固酮、硫酸脱氢表雄酮及性激素结合球蛋白、甲状腺球蛋白(TG)、生长激素(GH)、甲状旁腺激素(PTH)。本次将寄发全年 10 个批号质评样本。具体安排如下：

活动次数	批号	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 回报日期
第一次	202211, 202212, 202213, 202214, 202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221, 202222, 202223, 202224, 202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

注：为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

质控品为冻干品，未开瓶的质控品应保存在 2-8℃冰箱中；使用时准确加入 3ml 去离子水/蒸馏水，加盖在室温中放置 15 分钟，轻轻混匀后进行测定。复溶后，2-8℃下，可稳定 14 天；-20℃～-70℃下，可稳定 30 天。应将质控品当做病人标本处理和测定，并且视为有潜在传染性。

三、注意事项

- 1、若质控品接收后出现问题（如破损、标本重号等），请及时与室间质评室联系。
- 2、免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
- 3、室间质评活动中的专业问题可与牛长春联系：电话：（023）63510942。
- 4、参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系，电话：（023）63519127。

四、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心
2022 年 4 月