

重庆市临床检验中心

2022 年重庆市白细胞分类计数（仪器法）室间质量评价 活动安排

一、评价项目与时间表

2022 年重庆市临床检验中心白细胞分类计数（仪器法）室间质评活动全年安排 2 次,共计 10 个批号。本次活动发放 5 个批号的质评物,均保存在 2℃~8℃条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下:

活动次数	批号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202211,202212, 202213, 202214, 202215	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221,202222, 202223, 202224, 202225	收到即测	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 请各实验室收到质评物后, 尽快检测, 如无法及时检测, 请保存于 2℃~8℃。
2. 质评物的检测步骤:
 - (1) 检测前, 将质评物放置室温平衡 30 分钟;
 - (2) 轻轻颠倒混匀装有质评物的试管, 不要振摇, 避免产生气泡, 小心开启瓶盖, 进行检测。
 - (3) 检测样品时, 应按日常病人检测样品处理方式处理, 由日常工作人员使用实验室常规检测系统(仪器、试剂和方法等)检测, 检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
3. 回报结果时, 若仪器编码填写其他, 请务必详细填写具体名称及型号。
4. **使用注意事项和安全警告:** 质评物为由人源全血制备的样品, 其处理应视同疾病传染性制品, 按照实验室生物安全防护指南要求操作。

5. 本次活动仅适用于仪器分类。

三、其他注意事项

1. 收到质评物后, 应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符, 检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院网页 (www.cghhospital.org) 下面链接进入“重庆市临床检验中心”页面, 然后点击“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话 (010) 84533392-17。
3. 室间质评活动中的专业问题请与临检室联系, 电话: (023) 63504402, 联系人: 张文佳。质评办公室电话: (023) 63519127。

四、请直接在网上回报, 如果个别单位无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心质评室 邮编: 400014