

重庆市临床检验中心

2022 年重庆市血清淀粉样蛋白 A(SAA)定量检测室间质量评价 活动安排

一、评价项目与时间表

2022 年重庆市临床检验中心 血清淀粉样蛋白 A 定量检测室间质评活动全年安排 2 次。本年度活动共发放 10 个批号，每次 5 个批号的质评物，均保存在 2℃~8℃条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下：

活动次数	批号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202211,202212,202213,202214,202215	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221,202222,202223,202224,202225	收到即测	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 请各实验室收到质评物后，保存于 2℃~8℃。
2. 质评物的检测步骤：
 - (1) 检测前，将质评物放置室温平衡 30 分钟；
 - (2) 轻轻颠倒混匀装有质评物的试管，不要振摇，避免产生气泡，小心开启瓶盖，进行检测。
 - (3) 检测样品时，应按日常病人检测样品处理方式处理，由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
3. 回报结果时，若编码填写其他，请务必详细填写具体名称及型号。

4. 使用注意事项和安全警告：

- (1) 质评物为由人源血清制备的血清样品，其处理应视同疾病传染性制品，按照实验室生物安全防护指南要求操作。
- (2) 本质评物为血清样本，注意各个厂家仪器测量全血样本和血清样本是否存在区别，并以血清测定结果上报。换算关系请务必查阅各试剂品牌的说明书或与所用试剂厂家联系。

三、其他注意事项

1. 收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击<http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
3. 室间质评活动中的专业问题请与临检室联系，电话：（023）63504402，联系人：万雅芳。质评办公室电话：（023）63519127。

四、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014