

重庆市临床检验中心 2022 年重庆市抗凝血酶Ⅲ活性室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排：

2022 年重庆市抗凝血酶Ⅲ活性室间质评活动全年共进行 2 次，共 10 个批号，本次寄发全年的质控品，具体安排如下：

活动次数	质评物批号	建议测定日期	结果回报截止日期	临检中心回报时间
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

二、质评物使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。如不能及时测定，请将质评物置于 2~8℃冰箱中保存。
2. 本次下发的质控物为冻干质控品。
3. 测定前将质评物从冰箱中取出，平衡至室温。**冻干质控品用 1.0ml 纯水/蒸馏水复溶。**
4. 将质评血浆当作病人标本用您室现用的仪器和方法进行测定，结果填入回报表中。
5. **请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。**

三、结果回报：

1. 测定试剂、测定原理和仪器名称分别按各自编码填写，若您室所采用者不在列出的范围内，则请写出具体的名称，否则无法分组进行统计。
2. **校验和是此项目的 5 个批号测定结果之和，请务必填写；** 请各实验室将回报表中各项内容完整逐项地填写，请记住并填写您实验室的编号（新参加单位由临检中心办公室指定实验室编码）。
3. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院网页（www.cghhospital.org）下面链接进入“重庆市临床检验中心”页面，然后点击“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、质评物视为感染性物质处理。

五、室间质评活动中的专业问题请与临检中心万雅芳联系，电话 023-63504402。质评办公室电话：023-63519127。

六、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区內
重庆市临床检验中心质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月