

重庆市临床检验中心

2022 年感染性疾病血清学标志物系列 C 室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排：

2022 年感染性疾病血清学标志物系列 C（抗 HAV-IgM、抗 HEV-IgM）室间质量评价活动共进行 2 次，每次 5 个批号，质控样本分 2 次寄发。具体安排如下：

活动次数	批号	建议测定日期	回报结果截止日期	统计结果回报日期
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

二、质控血清的使用及注意事项：

- 收到质控血清后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，血清是否渗漏，如发现问题请及时与市临检中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。质控品请放 -20°C 保存。
- 质控血清中，AM 为 1:1000 倍稀释的样本，做检测时，如果试剂盒要求为 1:1000 倍稀释样本则无需再进行稀释；如果试剂盒要求稀释 1:1000 倍以上，则需进一步进行稀释；稀释倍数不足 1:1000 的试剂盒不能用于此质控样本的检测。其它项目的样本按原血清对待。
- 测定前请先将质控血清恢复到室温，然后颠倒混匀以保证标本均匀一致，如有因冻融而产生的絮状沉淀应离心后取上清检测，开盖后存放 $2-8^{\circ}\text{C}$ ，一周内检查完毕。
- 所发质控样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待。
- 请注意建议测定日期和回报结果截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。

三、结果回报：

- 请正确填写回报表中的各项内容，质评结果按批号填写，位置勿填错，填写数据时请“对号入座”，字迹清晰工整。
- 定性测定结果的判定：
 - ☆ 以所用试剂盒注明的方法计算 Cut Off (CO) 值，并依其判定结果。
 - ☆ S/CO 值计算：S 为待测样本的吸光度 (A) 值，CO 为 Cut Off 值。

特别提醒，检测结果为有反应性 (Reactive，在报表中以 R 表示)。所谓有反应性是指在酶免疫测定中，检测样本的 S/CO 值 ≥ 1.0 的结果或竞争法中 S/CO 值 ≤ 1.0 的结果；而阳性结果是指有反应性样本进一步作确认实验后的结果) 或阴性 (Negative，在报表中以 N 表示)。同时填上各自的 S/CO 比值 (保留小数点后 2 位)，不能报可疑结果。
- 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码，如编码表上未列出你室所采用的内容，请直接填上具体的内容，如果未填写则作为不合格报表。
- 免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话 (010) 84533392-17。

四、室间质评活动中的专业问题请与田华联系，电话：63516483。质评办公室电话：63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月