

重庆市临床检验中心 2022 年抗中性粒细胞胞浆抗体室间质量评价活动安排及注意事项

一、室间质评活动安排：

2022 年重庆市抗中性粒细胞胞浆抗体室间质评项目包括抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）、抗髓过氧化物酶(MPO)抗体和抗蛋白酶 3(PR3)抗体三项，全年质评活动进行 2 次，每次 3 个批号，**质控样本分 2 次寄发**。具体安排如下：

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202211、202212、202213	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

二、质控血清的使用及注意事项：

1. 收到质控血清后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，检查样本是否渗漏，如发现问题请及时与市临检中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。**收到质控样本后请于 2-8℃保存，并及时完成检测。**
2. 请注意**建议测定日期**和**回报结果截止日期**，在规定时间内回报的结果不予统计。
3. 按照临床样本对待。由于血清量较少（200μl/支），可能滞留在管盖部分，请您注意观察，可先离心一下，再打开管盖。
4. 所发质控样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待。

三、结果回报：

1. 请正确填写回报表中的各项内容，质评结果按批号填写，位置勿填错。
2. 测定结果的回报：
 - (1) ANCA 填写定性结果（+或-）、核型、滴度和起始稀释度，抗 MPO 抗体和抗 PR3 抗体填写定性结果（(+)或(-)），定量结果可选填。

(2) 对应代码如下：

ANCA 滴度代码：

滴度	代码
1:10	[11]
1:32	[12]
1:100	[13]
1:320	[14]
1:1000	[15]
>1:1000	[16]
其他	[90]

ANCA 起始稀释度代码：

滴度	代码
1:10	A1
1:20	A2
1:40	A3
其他	A9

ANCA 核型代码：

核型	代码
----	----

胞浆型 [101]

核周型 [102]

3. 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码，如编码表上未列出你室所采用的内容，请直接填上具体的内容，如果未填写则作为不合格报表。

4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院网页(www.cqrmhospital.com)下面科室链接进入“重庆市临床检验中心”页面，然后点击“重庆市临床检验中心 EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四. 室间质评活动中的专业问题请与田华联系，电话：63516483。质评办公室电话：63519127。

五. 请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院(三院院区)内
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月