

重庆市临床检验中心 2022 年重庆市自免肝室间质量评价活动安排及注意事项

一. 室间质评活动安排:

2022 年重庆市自免肝检测室间质评, 全年质评活动进行 2 次, 每次 3 个批号, 质评样本 1 次寄发, 评价项目包括抗线粒体抗体 M2 型 (AMA-M2)、抗肝肾微粒体抗体 (LKM-1)、抗肝细胞溶质抗体 (LC-1)、抗可溶性肝抗原/肝胰抗原 (SLA/LP)、抗 gp210 抗体、抗 Sp100 抗体、抗平滑肌抗体 (ASMA)。具体安排如下:

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202211、202212、202213	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分

析. 二. 质控血清的使用及注意事项:

1. 收到质控血清后, 应立即检查批号、数量是否与活动安排相符, 检查样本是否渗漏, 如发现问题请及时与市临检中心联系, 寄出质控品 10 日后不再补寄。**收到质控样本后请于 2-8℃ 保存, 并及时进行检测。**
2. 请注意**建议测定日期和回报结果截止日期**, 在规定时间内回报的结果不予统计。
3. 按照临床样本对待。由于血清量较少 (200μl/支), 可能滞留在管盖部分, 请您注意观察, 可先离心一下, 再打开管盖。
4. 所发质控样本虽已经灭活处理, 但由于潜在的传染因素, 仍应按传染性样本对待。

三. 结果回报:

- 1 请正确填写回报表中的各项内容, 质评结果按批号填写, 位置勿填错, 填写数据时请“对号入座”。
- 2 测定结果的回报:
报告定性检测结果 (报 “+” 或者 “-”);
- 3 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码, 如编码表上未列出你室所采用的内容, 请直接填上具体的内容, 如果未填写则作为不合格报表。
- 4 **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院三院院区网页 (www.cqrmhospital.com) 下面科室链接进入“重庆市临床检验中心”页面, 然后点击“重庆市临床检验中心 EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话 (010) 84533392-17。

四. 室间质评活动中的专业问题请与田华联系, 电话: 63516483。质评办公室电话: 63519127。

五. 请直接在网上报, 如果个别单位无法在网上回报, 可将报表寄至

: 重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院 (三院院区) 内重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编: 400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月