

## 重庆市临床检验中心

### 2022 年临床实验室新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸检测 室间质评活动安排（第一次）

#### 一. 室间质评活动安排:

2022 年第一次重庆市临床实验室新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸检测室间质评项目为 SARS-CoV-2 一项，共 5 个批号。具体安排如下：

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202211、202212、202213 202214、202215	收到即测	4 月 20 日	4 月 30 日

#### 二. 质控样本的使用及注意事项:

- 收到质控样本后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，质控样本是否渗漏；如发现问题请及时与市临检中心联系。质控品请放-20℃保存。
- 请注意建议测定日期和回报结果截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。
- 质控物 500ul/支，测定前请先将质控品恢复到室温，平衡 15 分钟，然后振荡混匀，取样前应瞬时离心（6000rpm 即可）。
- 质控样本为假病毒混悬液，添加适量的稳定剂制备而成，与临床样本具有良好的互通性。请仍按传染性样本对待，注意生物安全防护。
- 该质控请按病人样本对待进行检测，最低取样量为 200ul。实验室如使用免提试剂，请严格按照试剂盒说明书操作。

6. 请各临床实验室使用日常所用试剂和程序进行检测。

7. 请实验室根据情况选择一种或两种试剂检测，若采用两种试剂检测，检测结果均按要求回报。

8. 实验室的质评成绩评定以网络上报的最终结果为准，只接受“阴性”或“阳性”，不接受“可疑”结果。错报、漏报均不得分，请参加实验室高度重视。如果实验结果要求复检，请实验室重复检测质评样本，并将复检结果同时上报。

#### 三. 结果回报:

- 请正确填写回报表中的各项内容，务必填写实验室名称和实验室编号（新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码）；质评结果按批号填写，位置勿填错，填写数据时请“对号入座”，字迹清晰工整。
- 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码，如果编码表上未列

出你室所采用的内容，请直接填上具体的内容，如果未填写则作为不合格报表。

3. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

4. 要求参加实验室网络回报和“新型冠状病毒核酸检测室间质量评价结果回报表”（电子版）均按要求认真填写，填写信息必须完整，否则不予评价。将电子版回报结果发送至重庆市临床检验中心邮箱 854055108@qq.com，请注明为**单位+第一次新型冠状病毒核酸检测结果回报表**。

- 四. 室间质评活动中的专业问题请与免疫室联系，电话：023-63516483，联系人：田华 郭元元。质评办公室电话：023-63519127。

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月 11 日