

重庆市临床检验中心

2023 年临床实验室淋病奈瑟菌 DNA (NGH-DNA) 室间质评活动安排

一. 室间质评活动安排:

2023 年重庆市淋病奈瑟菌 DNA (NGH-DNA) 核酸检测室间质评项目为淋病奈瑟菌 DNA (NGH-DNA), 全年室间质量评价活动共进行 2 次, 每次 5 个批号, 质控样本分 2 次寄发。具体安排如下

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202311、202312、202313、202314、202315	5 月 8 日	5 月 19 日	6 月 5 日
第二次	202321、202322、202323、202324、202325	9 月 20 日	9 月 28 日	10 月 30 日

二. 质控血清的使用及注意事项:

1. 收到质控品后, 应立即检查批号、数量是否与活动安排相符, 是否渗漏; 如发现问题请及时与市临检中心联系, 寄出质控品 10 日后不再补寄。**质控品请放-20℃保存。**
2. 请注意**建议测定日期**和**回报结果截止日期**, 在规定时间内回报的结果不予统计。
3. NGH-DNA 为细胞系或细菌混悬液, 500ul/支; 测定前请先将质控品恢复到室温, 平衡 15 分钟, 然后振荡混匀, 取样前应瞬时离心 (6000rpm 即可)。
4. 所发质控样本虽已经灭活处理, 但由于潜在的传染因素, 仍应按传染性样本对待。
5. 该质控品按病人样本对待进行检测。

三. 结果回报:

1. 请正确填写回报表中的各项内容, 务必填写实验室名称和实验室编号 (新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码); 质评结果按批号填写, 位置勿填错, 填写数据时请“对号入座”, 字迹清晰工整。填写结果时只需填写“+”或“-”即可。
2. 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码, 如果编码表上未列出你室所采用的内容, 请直接填上具体的内容, 如果未填写则作为不合格报表。
3. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话 (010) 84533392-17。

四. 室间质评活动中的专业问题请与免疫室联系, 电话: 63516483, 联系人: 郭元元。质评办公室电话: 63519127。

五. 请直接在网上回报, 如果个别单位实在无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编: 400014

重庆市临床检验中心

2023 年 5 月