

重庆市临床检验中心

2023 年临床微生物学室间质量评价活动安排（第二次）

一、质控标本资料

标本编号	临床症状	标本来源	性别	年龄	试验说明
202321	心内膜炎	血液	男	53 岁	鉴定病原菌
202322	假体关节感染	分泌物	女	51 岁	鉴定病原菌
202323	肺癌患者，发热	血液	男	32 岁	鉴定病原菌
202324	尿路感染	尿液	女	52 岁	鉴定病原菌+药敏
202325	COPD 急性发作	痰	男	62 岁	鉴定病原菌+药敏

二、时间安排

建议检验时间：收到标本即做

回报截止时间：2023/9/30

统计回报时间：2023/10/30

三、注意事项

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。
2. 室间质评标本，请按临床标本处置，实验室中所有的技术人员都应参加，采用做病人标本同样方法、步骤操作及报告结果。本次质控标本为 5 管冻干菌种，**每管加 200ul 营养肉汤，充分混匀后接种于相应培养基**。按试验内容要求分离鉴定，药敏试验，并报告结果。
3. 药敏试验：纸片琼脂扩散法（K-B 法）或 MIC 法。K-B 法需填写纸片剂量，抑菌环直径保留整数位。根据你室常规使用的药敏方法、标本来源和分离的菌株类型，**选择 CLSI 建议的常规试验和报告的抗菌药物对主要病原菌进行药物敏感试验**并在报告表内相应处打☑，并填写结果。如果是自动和半自动系统，除填写报表外，再附上打印的报告。如果有向临床提示的信息，填写在“评论”栏内。药敏判断标准参照上一年 CLSI 药敏标准。
4. 标本保存：质评物放入 -20℃ 冰箱内保存。所有质控标本应当作为有传染性物质，应小心处理，高压灭菌后才能丢弃。
5. 实验说明：①鉴定主要病原菌：可能存在一种或以上微生物，鉴定有意义的病原菌。②药敏实验：对指定标本分离的有意义的病原菌，用各个实验室常规使用的方法做适合于分离病原菌的抗生素药敏试验，检测结果和报告结果不一定一致，因此两项都要填写，特别是**报告结果必须填写**，否则影响结果录入。
6. **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、联系方式

临检中心办公室电话：023-63519127、023-63516362，微生物室：023-63390339

五、请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝北区星光大道 118 号 重庆市人民医院（重庆市临床检验中心室间质评室）

重庆市临床检验中心

2023 年 9 月