

重庆市临床检验中心 2024 年乙型流感病毒核酸检测室间质评活动安排

一. 室间质评活动安排:

2024 年乙型流感病毒核酸 (FluB-RNA) 检测全年室间质量评价活动共进行 1 次, 每次 3 个批号。
具体安排如下:

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202421、202422、202423	9 月 20 日	9 月 30 日	10 月 30 日

二. 质控血清的使用及注意事项:

- 收到质控品后, 应立即检查批号、数量是否与活动安排相符, 是否渗漏; 如发现问题请及时与市临检中心联系, 寄出质控品 6 日后不再补寄。**质控品请放-20℃保存。**
- 请注意**建议测定日期和回报结果截止日期**, 在规定时间内回报的结果不予统计。
- FluB-RNA 为液体混悬液, 500ul/支; 测定前请先将质控品恢复到室温, 平衡 15 分钟, 然后振荡混匀, 取样前应瞬时离心 (6000rpm 即可)。
- 所发质控样本虽已经灭活处理, 但由于潜在的传染因素, 仍应按传染性样本对待。
- 该质控品按病人样本对待进行检测。

三. 结果回报:

- 请正确填写回报表中的各项内容, 务必填写实验室名称和实验室编号 (新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码); 质评结果按批号填写, 位置勿填错, 填写数据时请“对号入座”, 字迹清晰工整。填写结果时只需填写“+”或“-”即可。
- 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码, 如果编码表上未列出你室所采用的内容, 请直接填上具体的内容, 如果未填写则作为不合格报表。
- 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话 (010) 84533392-17。

四. 室间质评活动中的专业问题请与分子室联系, 电话: 023-63390340, 联系人: 郭元元。质评办公室电话: 023-63519127。

五. 请直接在网上回报, 如果个别单位实在无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市两江新区星光大道 118 号 重庆市人民医院
重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024 年 9 月