

## 重庆市临床检验中心

## 2024 年微生物质谱检验室间质量评价活动安排（第一次）

## 一、质控标本资料

标本编号	模拟标本	试验说明
202421	肺泡灌洗液	鉴定病原菌
202422	血液	鉴定病原菌
202423	脓液	鉴定病原菌

## 二、时间安排

建议检验时间：收到标本即做

回报截止时间：2024/9/30

统计回报时间：2024/10/30

## 三、注意事项

- 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 6 日后不再补寄。
- 室间质评标本，请按临床标本处置，实验室中所有的技术人员都应参加，采用做病人标本同样方法、步骤操作及报告结果。
- 标本保存：收到立即检测，如不能立即检测，质评物需放入-20℃以下储存。质评物溶解后于 2℃~8℃条件下保存不超过 24 小时。所有质控标本应当作为传染性物质，应小心处理，高压灭菌后才能丢弃。

## 4. 实验说明：

- 样品从要求储存环境中取出，按所使用的要求微生物质谱样本预处理试剂说明书，加入 10μL 的裂解液进行溶解，溶解过程中应充分混匀，不要振摇，避免产生气泡；
- 考虑到样品量较少，使用前应将裂解后的样品离心后小心开启瓶盖，取上清液进行检测。
- 参考微生物质谱仪器的操作方法，将样品等同于临床样本在质谱仪上进行检测并读取检验结果。

## 4) 质品物无活菌切勿增菌。

5. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院网页（[www.cqrmhospital.com](http://www.cqrmhospital.com)）下面科室链接进入“重庆市临床检验中心”页面，然后点击“重庆市临床检验中心 EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

## 四、联系方式

临检中心办公室电话：023-63519127 细菌室：023-63390339

## 五、请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市两江新区星光大道 118 号 重庆市人民医院本部

重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024 年 9 月